

Doctor Magic

Estimados padres,

cuando el niño toma el audiograma MAGIC deja de ser el paciente, para ser ahora el doctor que tiene que ayudar a los animales! La tarea es de examinar a los animales y decidir, si pueden hablar (tonos "bip") o si tendrían que llevar una bufanda, porque los animales no pueden hacer "bip".

Hay tres pasos que hacer:

1. Elija un grupo de animales y después un paciente (animal). Esperan en la sala de espera.
2. Apriete la panza del animal.
3. Escuchaste un tono?
 - Sí! Apriete el animal feliz, el animal puede hablar.
 - No! Pulse el animal triste y prescribale una bufanda como remedio!

Después de que todos los animales (de un grupo de frecuencia) son atendidos, otro grupo de animales entra a la sala de espera. La prueba necesita aproximadamente 2 minutos por cada oído.

