

Doctor Magic

Drodzy rodzice,

podczas wykonywania Audiogramu MAGIC dziecko nie jest już pacjentem, lecz lekarzem i musi pomagać zwierzętom!

Zadanie polega na zbadaniu zwierząt i podjęciu decyzji, kiedy mogą mówić (wydając sygnały dźwiękowe) lub czy powinny nosić szalik, ponieważ nie mogą wydawać dźwięków.

TRZY KROKI:

1. Wybierz grupę zwierząt, a następnie pacjenta (zwierzę). Zwierzęta czekają w poczekalni.
2. Naciśnij na brzuszek zwierzęcia.
3. Czy słyszałeś sygnał?
 - Tak! Naciśnij na wesołe zwierzę. Zwierzę może mówić.
 - Nie! Naciśnij na smutne zwierzę i przepisuj szalik jako lekarstwo!

Po zbadaniu zwierząt (z danej grupy częstotliwości) kolejna grupa zwierząt wchodzi. Badanie trwa około 2 minut na każde ucho.

