


QUICK START GUIDE

Tonaudiometrie

Umschalten des aktiven Schallwandlers


AC: Luftleitung
 BC: Knochenleitung Mastoid
 BC-F: Knochenleitung Stirn

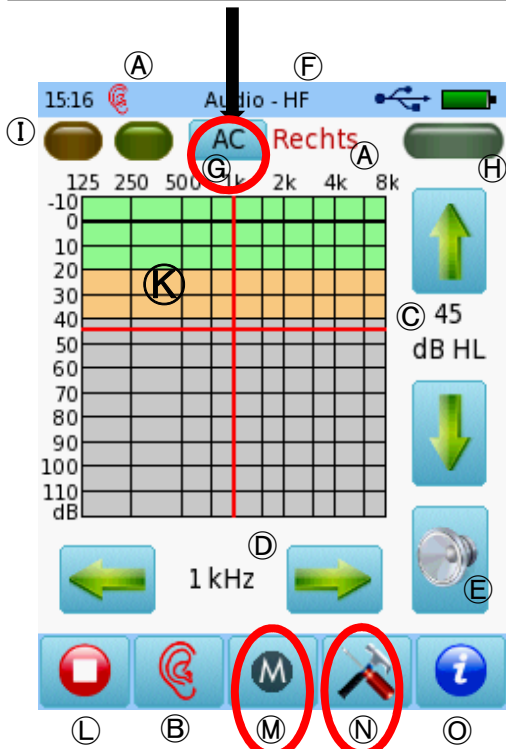


- (A) Seite
- (B) Seite umschalten
- (C) Pegelsteller für Ton
- (D) Frequenz einstellen
- (E) Tonschalter
- (F) HF: Hochfrequenzaudiometrie mit Sennheiser HDA 300
- (G) Umschalten des aktiven Schallwandlers
 AC: Luftleitung
 BC: Knochenleitung Mastoid
 BC-F: Knochenleitung Stirn
- (H) Lampe: Patienten-Taster
- (I) Lampe: Ton an/aus
- (J) Lampe: Vertäubung an/aus
- (K) Ins Audiogramm tippen:
 1. Schwelle setzen
 2. Keine Antwort
 3. Symbol löschen
- (L) Messung beenden
- (M) Vertäubung einschalten
- (N) Einstellungen und Ansprechen mittels Tischmikrofon

- (O) Hilfe
- (P) Pegelsteller für Vertäubung
- (Q) Vertäubung ausschalten
- (R) Pegel für Ton und Vertäubung koppeln
- (S) Schallwandler:
 LL, KL Mastoid, KL Stirn
- (T) Stimulus: Dauerton, gepulster Ton, Frequenzmodulation (Wobbelton)
- (U) Messung der Unbehaglichkeitsschwelle statt Tonschwelle
- (V) Einschalten der automatisierten Schwellenmessung
- (W) Anzeige beider Ohren im Audiogramm
- (X) Ansprechen per Tischmikrofon, wenn es beim Start des Audiometers angeschlossen war
- (Y) Geänderte Einstellungen übernehmen
- (Z) Geänderte Einstellungen verwerfen

Vertäubung einschalten

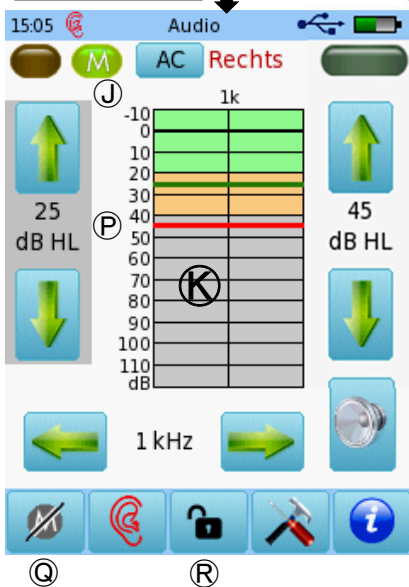

Einstellungen und Ansprechen mittels Tischmikrofon

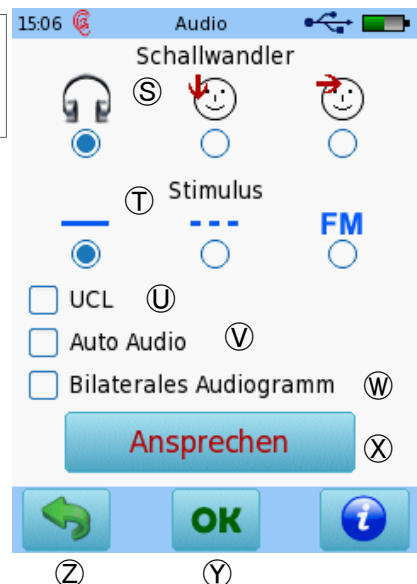

QUICK START GUIDE

Tonaudiometrie

Quick Guide Information

Freigabedatum: 2018-04-18
Version: 01
Gültig ab: Firmware Rev. 2.3

Anwendbar auf: Alle Modelle.

Alle genannten Artikel, Produktbezeichnungen, Marken und Warenzeichen gehören den genannten Unternehmen oder sind von diesen registriert.

Alle in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Informationen, Illustrationen und Spezifikationen basieren auf den zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültigen Produktinformationen. PATH MEDICAL behält sich das Recht vor, Änderungen jederzeit ohne Vorankündigung vorzunehmen.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte, die auf unserer Webseite und in Broschüren gezeigt werden, in allen Vertriebsgebieten verfügbar sind. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Distributor oder PATH MEDICAL für weitere Informationen.

Die letzte Version des Quick Start Guide ist verfügbar unter www.pathme.de/learn.

Irrtümer und Auslassungen vorbehalten.

Hinweis zum Urheberrecht

Die Bedienungsanleitung darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von PATH MEDICAL weder vollständig noch teilweise mit irgendwelchen Hilfsmitteln, seien diese elektronisch, mechanisch, optisch, usw., kopiert, übersetzt, gespeichert oder übermittelt werden.

Copyright © 2018 PATH MEDICAL GmbH

PATH MEDICAL GmbH
Landsberger Straße 65
82110 Germering
Germany

Tel.: +49 89 800 76 502 Fax: +49 89 800 76 503 Internet: www.pathme.de

