

# GUÍA RÁPIDA SENTIERO HANDHELD SCREENER OAE Y AUDIOMETRÍA (ETIQUETA VERDE)

## ENCENDIDO, APAGADO, CARGA DEL EQUIPO




Botón de encendido /apagado al lado derecho



Conector para el cargador

## MENÚ DE INICIO

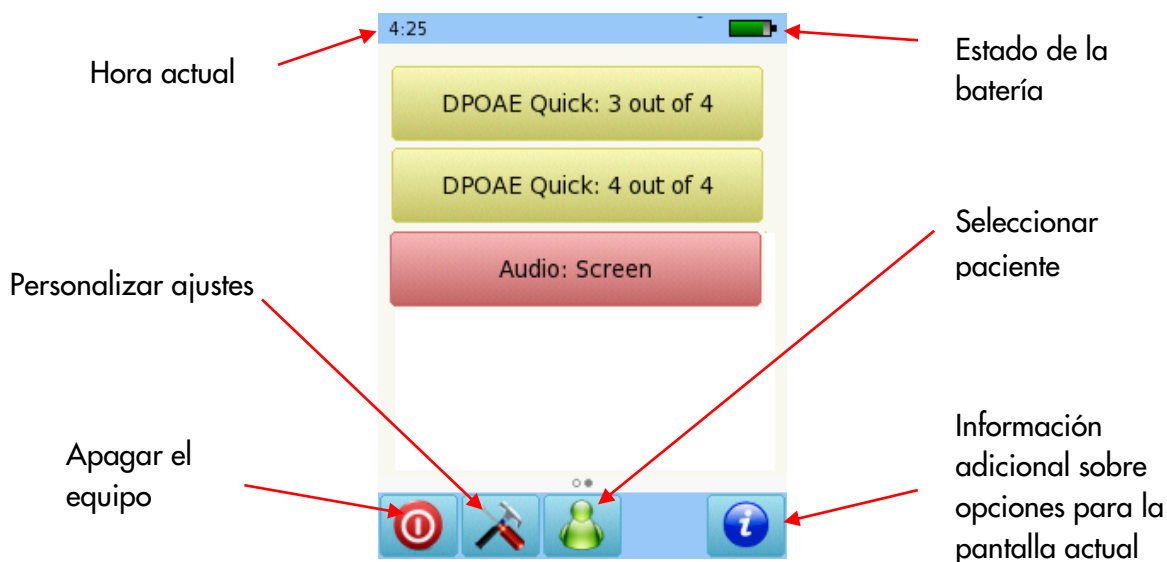

## PRUEBAS

### AUDIOMETRÍA

Conecte los auriculares al conector azul y seleccione el botón de Audiometría: Screening en el menú de inicio. Seleccione el oído en el que desea comenzar la prueba



# GUÍA RÁPIDA SENTIERO HANDHELD SCREENER OAE Y AUDIOMETRÍA (ETIQUETA VERDE)

## PANTALLA DE PRUEBA DE AUDIOMETRÍA SCREENING

Indicador de estímulo

Seleccionar nivel de estímulo

Seleccionar frecuencia

Presionar para presentar estímulo

Detener la prueba

Información adicional sobre opciones para la pantalla actual

Seleccionar oído a examinar

Seleccionar el tipo de estímulo:  
 tono puro — tono pulsado ...  
 o warble FM

Al presentar el estímulo, se muestra el nivel actual en el cuadro correspondiente. Una vez que se ha identificado el estado de audición para una frecuencia, pase a la siguiente.


Al presionar dos veces en uno de los cuadros aparecerá NR (no hay respuesta).

Presione tres veces para regresar al cuadro vacío.

Una vez que se han examinado todas las frecuencias para un oído, puede examinar el otro.


# GUÍA RÁPIDA SENTIERO HANDHELD SCREENER OAE Y AUDIOMETRÍA (ETIQUETA VERDE)

Al terminar la prueba, presione el botón de Detener. Puede agregar los datos personales del paciente y guardarlos en el equipo, imprimir una etiqueta (se necesita una impresora de etiquetas), imprimir a un archivo pdf o un informe completo en la PC.

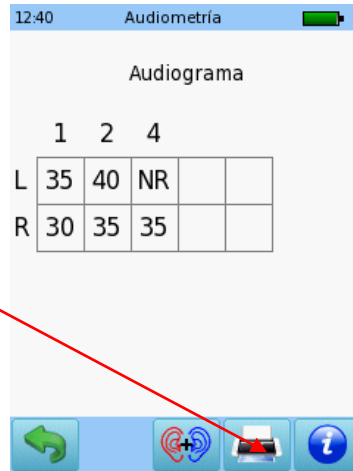

## SCREENING CON OTOEMISIONES DE PRODUCTO DE DISTORSIÓN (DPOAE)

Conecte la sonda al conector rojo. Seleccione el botón de Screening o el Standard en el menú de inicio.

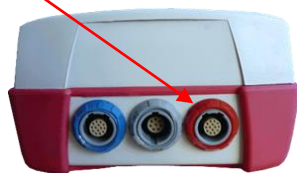

Seleccione el tamaño adecuado de oliva y colóquela en la punta de la sonda. Inserte la sonda en el oído asegurándose de obtener un buen sello del canal auditivo.

Seleccione el oído a examinar presionando el ícono de oído Derecho o Izquierdo. Seleccione modo globos para mostrar globos al terminar la prueba.

09:28 DPOEA(Screen)

Derecho


Izquierdo

Modo globos



# GUÍA RÁPIDA SENTIERO HANDHELD SCREENER OAE Y AUDIOMETRÍA (ETIQUETA VERDE)


Se realizará una calibración antes de la medición. Una luz verde indica una calibración correcta. Luego de una calibración correcta de la sonda (ver abajo a la izquierda), la prueba comenzará automáticamente.

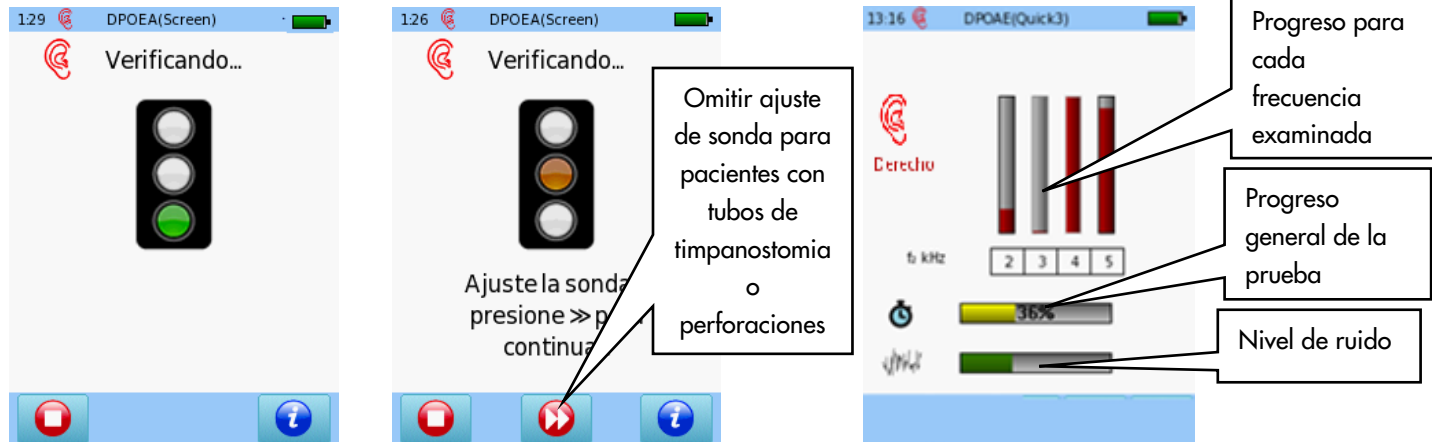

## RESULTADOS DE LA PRUEBA DPOAE

### VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS (Simple)

Por favor tenga en cuenta que la pantalla inicial de resultados depende de los ajustes para el módulo seleccionados en "Preferencias de DPOAE"

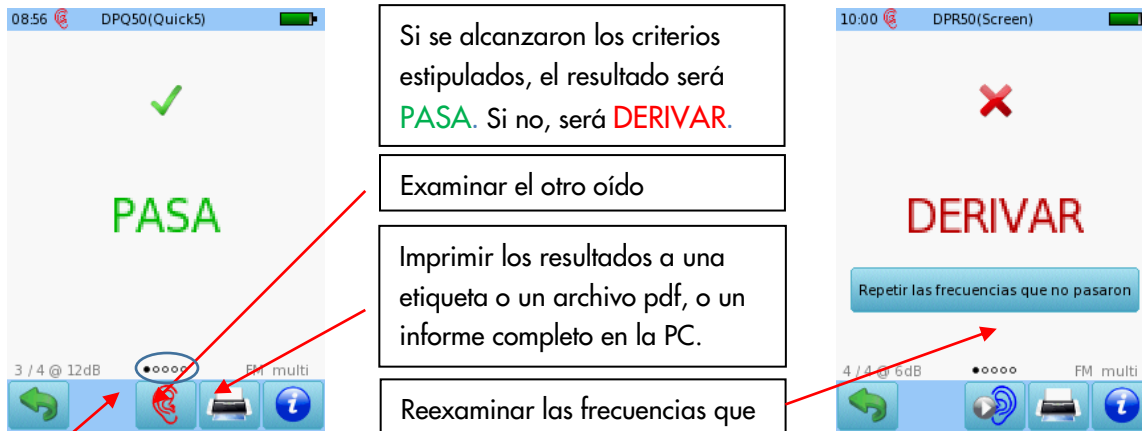


*Nota: Estos círculos indican que hay otras pantallas que pueden verse. Deslice el dedo hacia la derecha o izquierda para ver las otras pantallas.*

# GUÍA RÁPIDA SENTIERO HANDHELD SCREENER OAE Y AUDIOMETRÍA (ETIQUETA VERDE)

## VISUALIZACIÓN DETALLADA DE RESULTADOS




Las barras rojas (oído derecho) o azules (oído izquierdo) indican respuesta, Las barras grises indican ruido.

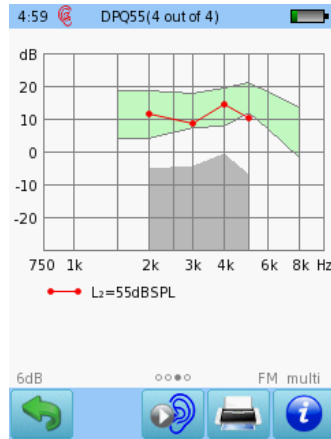

Resultado para cada prueba ordenado por  $f_2$  y  $L_2$

L <sub>2</sub>	f <sub>2</sub>	DPOAE	N	SNR
55	2000	11.4	-5.2	16.7
55	3000	8.6	-4.5	13.0
55	4000	14.2	-0.7	14.9
55	5000	10.3	-6.7	16.9

Valores numéricos en formato tabular

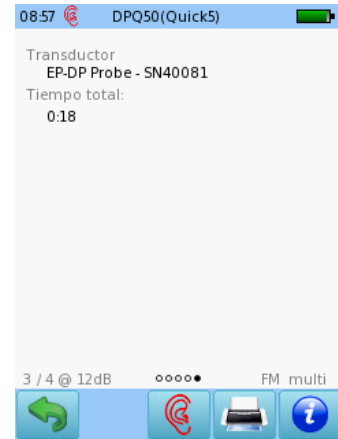

Parámetros de la prueba

# GUÍA RÁPIDA

## SENTIERO HANDHELD SCREENER OAE Y AUDIOMETRÍA (ETIQUETA VERDE)

---

### Información de la Guía Rápida

Fecha de publicación: 2019-07  
Revisión: 02  
Válida a partir de: Rev. de Firmware 2.5, Rev. software Mira para PC 2.0  
Aplicable a: Modelo: SOH100098, descripción de Internet SOH01.

Todos los artículos, productos y marcas mencionados están registrados por las empresas indicadas o pertenecen a las mismas.

Toda la información, ilustraciones y especificaciones incluidas en este documento se basan en la información más reciente sobre los productos disponible en el momento de la publicación. PATH MEDICAL se reserva el derecho de efectuar cambios en cualquier momento sin notificación.

Por favor tenga en cuenta que no todos los productos que se muestran en nuestro sitio de Internet o en los materiales de publicidad están disponibles en todos los territorios. Por favor contacte a su distribuidor local o a PATH MEDICAL para mayor información.

La revisión más reciente de la Guía Rápida está disponible en Internet en [www.pathme.de/download](http://www.pathme.de/download).

Se exceptúan los errores y las omisiones.

### Derechos de autor

Ninguna parte de este documento puede reproducirse, traducirse, guardarse, o transmitirse por ningún medio, electrónico, mecánico, fotocopia, grabación ni ningún otro, sin previamente obtener autorización escrita de PATH MEDICAL GmbH.

Copyright © 2019 PATH medical GmbH

PATH medical GmbH  
Landsberger Straße 65  
82110 Germering  
Germany

Tel.: +49 89 800 76 502 Fax: +49 89 800 76 503 Internet: [www.pathme.de](http://www.pathme.de)

**CE**  
0124