

# GUÍA RÁPIDA SENTIERO ADVANCED ASSR (ETIQUETA DORADA)

## ENCENDIDO, APAGADO, CARGA DEL EQUIPO



Botón de encendido/apagado al lado derecho



Conector para el cargador


## MENÚ DE INICIO

*Nota: esta pantalla (opciones de prueba) puede variar dependiendo de la configuración de su equipo*

Hora actual

Personalizar ajustes

Apagar el equipo

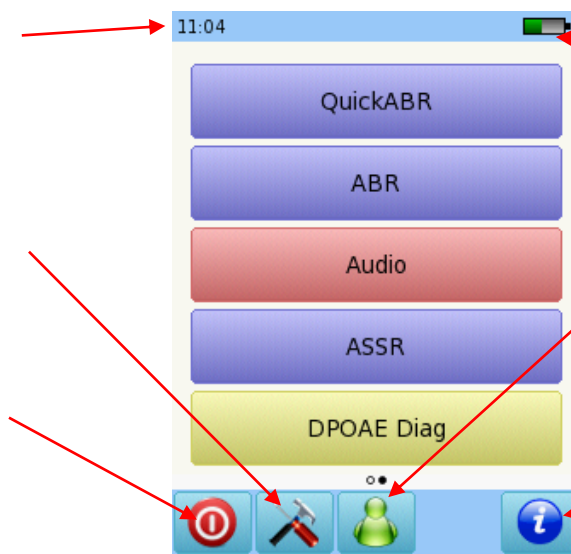

Estado de la batería

Seleccionar paciente

Información adicional sobre opciones para la pantalla actual

# GUÍA RÁPIDA SENTIERO ADVANCED ASSR (ETIQUETA DORADA)


## PRUEBA

### POTENCIALES EVOCADOS DE ESTADO ESTABLE (ASSR)

Conecte el cable de electrodos



al conector blanco.

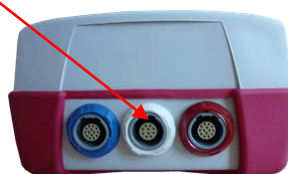

Conecte el transductor al conector correspondiente:


Auriculares o auriculares de inserción: conector azul

Sonda: conector rojo

Segunda sonda para prueba binaural: conector azul

Vibrador óseo: conector rojo

Limpie la piel del paciente y coloque los parches de electrodos. Conecte los clips en los sitios correspondientes. El montaje recomendado es:

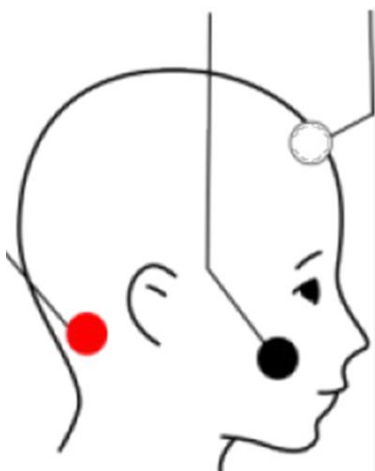

Blanco: parte alta de la frente

Negro: mejilla

Rojo: mastoide

Para pruebas binaurales, coloque el clip rojo en la nuca


# GUÍA RÁPIDA SENTIERO ADVANCED ASSR (ETIQUETA DORADA)

Si está utilizando una sonda o auriculares de inserción, seleccione el tamaño adecuado de oliva y colóquela en la punta de la sonda. Inserte la sonda en el oído asegurándose de obtener un buen sello del canal auditivo.

Si está utilizando auriculares, colóquelos sobre los oídos.

Seleccione ASSR.

Seleccione el protocolo que desea utilizar. Para cambiar parámetros, seleccione uno de los protocolos y luego el botón de herramientas al pie de página:

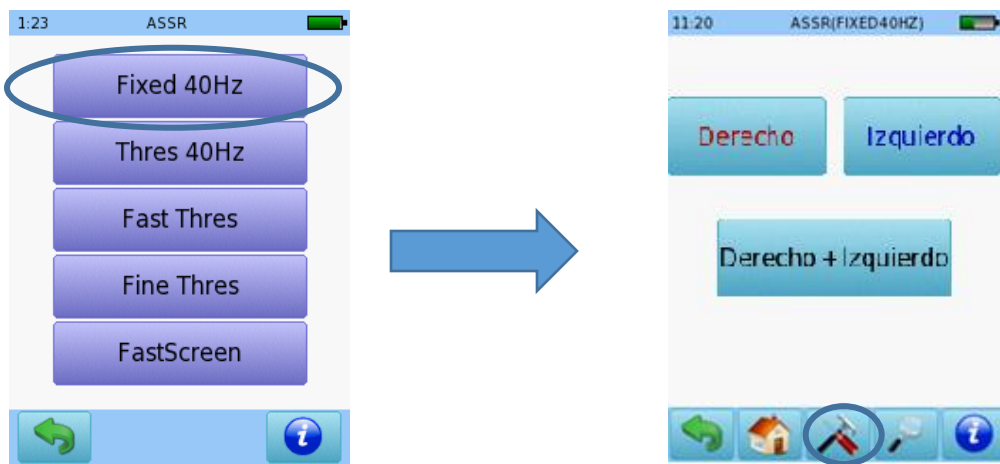

## PARÁMETROS DE PRUEBA CONFIGURABLES

Los estímulos de media octava tienen mejor especificidad de frecuencia pero precisan más tiempo de prueba


Seleccione las frecuencias a examinar

Seleccione el ruido de enmascaramiento (solamente para prueba monoaural)



Seleccione el nivel inicial, mínimo y máximo para el modo adaptativo.


Fijo: se examinarán todos los niveles seleccionados  
Adaptativo: utilizado para búsqueda de umbrales

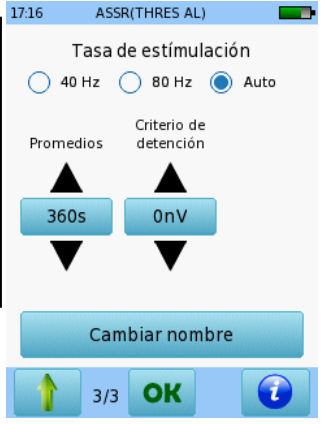

40 Hz: pacientes despiertos y adultos  
80 Hz: bebés y frecuencias altas  
Auto: tasa mixta, desempeño optimizado


# GUÍA RÁPIDA SENTIERO ADVANCED ASSR (ETIQUETA DORADA)

Seleccione el oído que desea examinar presionando el botón de oído Derecho o Izquierdo, o Derecho + Izquierdo para prueba binaural. Puede realizarse prueba binaural cuando se han conectado auriculares, auriculares de inserción o dos sondas.

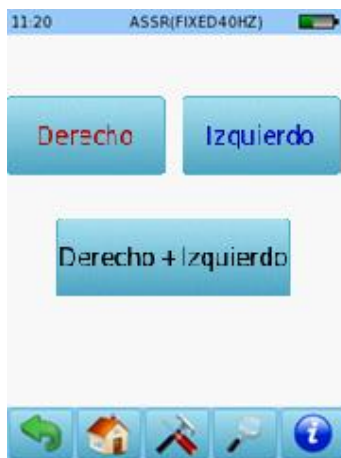

Asegúrese de que el paciente esté cómodamente sentado o acostado.

Se realizará una verificación de la impedancia antes de la medición. Si la impedancia es menor que 6 kOhm, aparecerá el botón de comenzar. Pueden configurarse las preferencias de la prueba para comenzar automáticamente si la impedancia es menor que 4 kOhm. Si la impedancia es mayor que 6 kOhm pero menor que 12 kOhm, aparecerá un botón de avanzar. Se recomienda una impedancia inferior a 6 kOhm para mejores resultados.

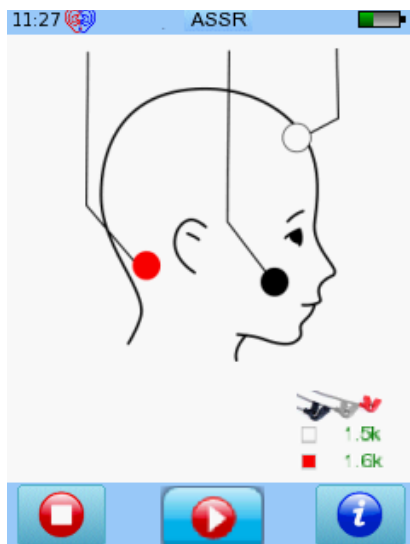

# GUÍA RÁPIDA SENTIERO ADVANCED ASSR (ETIQUETA DORADA)

Si está utilizando una sonda, se realizará una calibración junto con la verificación de impedancia. Puede seleccionar el modo de calibración simple o experto en los ajustes del equipo.



Modo de calibración simple



Modo de calibración experto

## PANTALLA DE PRUEBA DE ASSR

Progreso para cada frecuencia examinada

EEG general. El valor debería mantenerse en el tercio inferior. Presione para ver los datos de EEG sin procesar.

Progreso de la prueba

Detener la prueba

Pausar la prueba en curso

Omitir solamente esta prueba



Frecuencia que se está examinando

Nivel de intensidad que se está examinando


Monitor de impedancia

# GUÍA RÁPIDA SENTIERO ADVANCED ASSR (ETIQUETA DORADA)

## RESULTADOS DE PRUEBA DE ASSR

Por favor tenga en cuenta que el audiograma estimado está disponible solamente para el modo adaptativo.

*Nota: Estos círculos indican que hay otras pantallas que pueden verse. Deslice el dedo hacia la derecha o izquierda para ver las otras pantallas.*

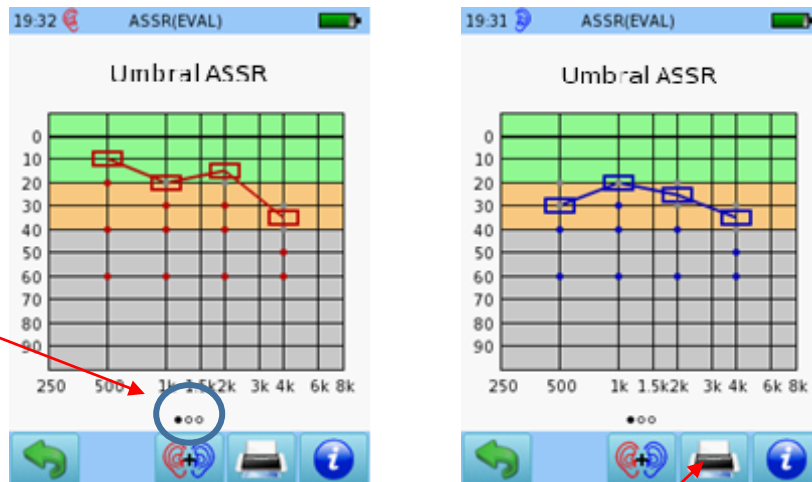

Imprimir los resultados a una etiqueta o archivo pdf



Presione sobre una flecha verde o círculo para ver detalles

Parámetros de la prueba



# GUÍA RÁPIDA SENTIERO ADVANCED ASSR (ETIQUETA DORADA)

---

## Información de la Guía Rápida

Fecha de publicación: 2019-07  
Revisión: 01  
Válida a partir de: Rev. de Firmware 2.5, Rev. software Mira para PC 2.0  
Aplicable a: Modelo: SOH100360, descripción de Internet SOH09

Todos los artículos, productos y marcas mencionados están registrados por las empresas indicadas o pertenecen a las mismas.

Toda la información, ilustraciones y especificaciones incluidas en este documento se basan en la información más reciente sobre los productos disponible en el momento de la publicación. PATH MEDICAL se reserva el derecho de efectuar cambios en cualquier momento sin notificación.

Por favor tenga en cuenta que no todos los productos que se muestran en nuestro sitio de Internet o en los materiales de publicidad están disponibles en todos los territorios. Por favor contacte a su distribuidor local o a PATH MEDICAL para mayor información.

La revisión más reciente de la Guía Rápida está disponible en Internet en [www.pathme.de/download](http://www.pathme.de/download).  
Se exceptúan los errores y las omisiones.

## Derechos de autor

Ninguna parte de este documento puede reproducirse, traducirse, guardarse, o transmitirse por ningún medio, electrónico, mecánico, fotocopia, grabación ni ningún otro, sin previamente obtener autorización escrita de PATH MEDICAL GmbH.

Copyright © 2019 PATH MEDICAL GmbH

PATH MEDICAL GmbH  
Landsberger Straße 65  
82110 Germering  
Germany

Tel.: +49 89 800 76 502 Fax: +49 89 800 76 503 Internet: [www.pathme.de](http://www.pathme.de)

CE  
0124